



UNIPHARM

INSTRUKCJA STOSOWANIA – NALEŻY PRZECZYTAĆ UWAGNIE

Hialuronian sodu 0,15%, Dekspantenol 2%

XEDRENIO Dex

Nawilżające krople do oczu
z dekspantenolem

Bez konserwantów

Krople są przeznaczone do łagodzenia objawów **suchych oczu** oraz **regeneracji** powierzchni oka.

Skład: chlorek sodu, diwodorofosforan sodu dwuwodny, fosforan dwusodowy bezwodny, hialuronian sodu 0,15%, dekspantenol 2%, woda oczyszczona.

Zastosowanie: XEDRENIO Dex, krople do oczu przeznaczone są do zmniejszenia łagodnego oraz umiarkowanego uczucia suchości w oku, stabilizacji filmu łzowego, nawilżenia oraz wygładzenia powierzchni oka.

XEDRENIO Dex, krople do oczu mają również zastosowanie w przypadkach:

- mechanicznego podrażnienia powierzchni oka (wywołanego noszeniem soczewek kontaktowych badań diagnostycznych lub zabiegów chirurgicznych oka),
- mechanicznego podrażnienia na skutek działania czynników zewnętrznych (wiatr, słońce, chlorowana woda, podawanie leków do oka);
- zmęczenia oczu (na skutek długotrwałej pracy przy komputerze).

Zastosowanie kropli do oczu powoduje szybkie złagodzenie powyższych objawów.

XEDRENIO Dex krople do oczu wykazują podwójne działanie: zawierają hialuronian sodu, który ma działanie nawilżające i stabilizujące film łzowy oraz dekspantenol, który łagodzi, chroni i wspomaga regenerację powierzchni oka. Dzięki temu można złagodzić objawy suchości oka i zapobiec dalszym komplikacjom spowodowanym przez ten stan.

Przyczyny suchości oczu:

- zabiegi chirurgiczne, urazy oka lub obecność ciał obcych w oku,
- zaburzenia w funkcjonowaniu filmu łzowego spowodowane niewystarczającą ilością łez lub ich nadmiernym parowaniem, które może doprowadzić do uszkodzenia powierzchni oka i dyskomfortu,
- środowisko (ogrzewanie, klimatyzacja, ostre światła, dym i wiatr),
- długotrwała praca przy komputerze,
- stosowanie kropli do oczu o działaniu obkurczającym,
- proces starzenia,
- noszenie soczewek kontaktowych,
- pleć (zmiany hormonalne w okresie ciąży, karmienia piersią, menstruacji lub menopauzy),
- działanie innych leków (produktów stosowanych w leczeniu depresji, nadciśnienia, antykoncepcji),
- inne stany chorobowe (reumatoidalne zapalenie stawów, cukrzyca, astma, choroby tarczycy, jaskra).

Produkt XEDRENIO Dex, krople do oczu może być stosowany przez osoby noszące soczewki kontaktowe. Zastosowana technologia aplikacji pozwala na bezpieczne stosowanie produktu, a także zapobiega zakażeniu roztworu po jego otwarciu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie należy stosować kropli XEDRENIO:

- w przypadku nadwrażliwości (alergii) na hialuronian sodu lub na każdy inny składnik kropli. W przypadku pojawienia się reakcji alergicznej, należy zaprzestać stosowania wyrobu i natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Inne ostrzeżenia:

- Jeśli pacjent stwierdzi naruszenie lub zniszczenie aplikatora, nie należy stosować produktu.
- Dla zapewnienia bezpiecznej aplikacji i odpowiedniego poziomu higieny, każde opakowanie kropli powinno być używane wyłącznie przez jednego użytkownika.
- Nie są znane żadne interakcje pomiędzy kroplami XEDRENIO i płynami do soczewek kontaktowych, innymi kroplami do oczu lub maściami stosowanymi do oczu. Jeśli pacjent stosuje inny produkt do oka, należy odczekać przynajmniej 15 minut pomiędzy aplikacjami.

Bezpieczeństwo produktu

Technologia z zastosowaniem aplikatora zawierającego filtr, który pozwala na bezpieczne stosowanie kropli, gdyż zapobiega on zakażeniu roztworu po jego otwarciu.

Produkt nie zawiera konserwantów, co obniża ryzyko wystąpienia podrażnienia i uszkodzenia powierzchni oka.


Produkt jest dobrze tolerowany. Jeśli jednak pacjent zaobserwuje jakiegokolwiek działania niepożądane, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Instrukcja stosowania: Krople mogą być stosowane wielokrotnie w ciągu dnia, w zależności od potrzeby. W przypadku prawidłowego stosowania, jedna butelka kropli wystarcza na 30 dni stosowania. W przypadku konieczności dłuższego stosowania, należy skonsultować się z lekarzem.

Należy podać 1–2 krople do worka spojówkowego, a następnie mrugnąć powieką kilka razy w celu rozprowadzenia kropli po całej powierzchni oka.

Produkt nie zawiera konserwantów, aplikacja kropli jest bezpieczna dla oczu.

Krople do oczu mogą być aplikowane na dwa sposoby, przedstawione poniżej:

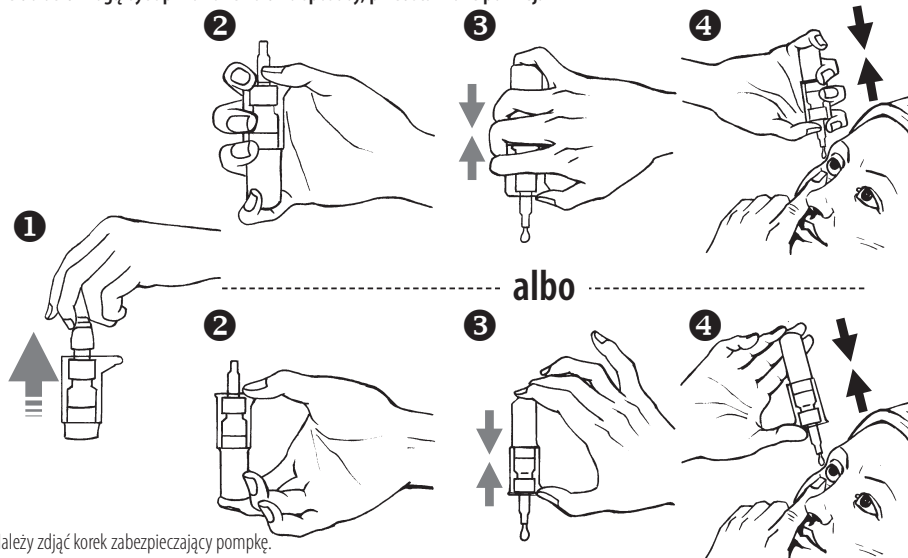

1. Należy zdjąć korek zabezpieczający pompkę.
2. Chwycić pompkę ręką, jak pokazano na rysunku 2.
3. Odwrócić butelkę i nacisnąć pompkę, aż do chwili, kiedy pojawi się pierwsza kropla roztworu.
4. Trzymać butelkę odwróconą, należy podać do oka odpowiednią ilość kropli poprzez naciskanie pompki.

Uwaga: natychmiast po zastosowaniu kropli, widzenie może ulec pogorszeniu. Dlatego zaleca się, aby podczas krótkiego okresu czasu powstrzymać się od prowadzenia pojazdów lub obsługiwanie maszyn i poczekać, aż powróci ostrość widzenia.

INNE WYROBY MEDYCZNE Z SERII XEDRENIO

Wyrób medyczny	Przeznaczenie	Skład	Stosowanie	Przyczyny zaburzeń	Stosowanie z soczewkami kontaktowymi	Działanie
XEDRENIO	Stany łagodnego wysuszenia oczu	Hialuronian sodu 0,21%	Podać 1-2 krople do oka kilka razy w ciągu dnia lub w zależności od potrzeby	alergia, uczucie ciała obcego w oku, czynniki zewnętrzne (suche powietrze, dym), noszenie soczewek kontaktowych	Tak	Natychmiastowe odświeżenie i długotrwałe uczucie nawilżenia
XEDRENIO Forte	Stany silnego wysuszenia oczu	Hialuronian sodu 0,4%	Podać 1-2 krople do oka kilka razy w ciągu dnia lub w zależności od potrzeby	proces starzenia, farmakoterapia, silnie działające czynniki zewnętrzne (wiatr, słońce, suche powietrze)	Nie	Natychmiastowa ulga, długotrwałe uczucie komfortu i nawilżenia, produkt może powodować chwilowe zaburzenia ostrości widzenia
XEDRENIO Dex	Stany wysuszenia oczu i regeneracji powierzchni oczu	Hialuronian sodu 0,15% + Dekspantenol 2%	Podać 1-2 krople do oka kilka razy w ciągu dnia lub w zależności od potrzeby	podrażnienia mechaniczne oczu: noszenie soczewek kontaktowych, zabiegi chirurgiczne lub diagnostyczne, stosowanie leków	Tak	Natychmiastowe odświeżenie i długotrwałe uczucie nawilżenia

Wielkość opakowania: 10 ml

Data ważności znajduje się na opakowaniu.

Okres ważności po pierwszym otwarciu wynosi 180 dni. Nie należy stosować produktu po upływie daty ważności.

Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej 25°C, w oryginalnym opakowaniu. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.



UNIPHARM

Dystrybutor:
UNIPHARM HOLDINGS Sp. z o.o.,
Ul. Puławska 428
02-884 Warszawa

JADRAN GALENSKI LABORATORIJ D.D.,
Svilno 20, 51000 Rijeka,
Chorwacja

Wyjaśnienie znaków graficznych:


Wytwórca



Należy przeczytać instrukcję stosowania



Produkt sterylny, aseptyczny proces wytwarzania



Znak CE



Przechowywać w temperaturze do 25°C



Data ważności



Numer serii:



Uwaga, należy sprawdzić instrukcję stosowania (w celu zapoznania się z istotnymi informacjami dotyczącymi ostrzeżeń i środków ostrożności).

Data aktualizacji 02/2018.