

INSTRUKCJA STOSOWANIA – NALEŻY PRZECZYTAĆ UWAŻNIE

Krople są przeznaczone do łagodzenia objawów **suchych oczu**.

Skład: chlorek sodu, diwodorofosforan sodu dwuwodny, fosforan dwusodowy bezwodny, hialuronian sodu 0,21%, woda oczyszczona.

Zastosowanie: XEDRENIO, krople do oczu przeznaczone są do zmniejszenia łagodnego uczucia suchości w oku w celu ochrony, nawilżenia oraz wygładzenia powierzchni oka. Zastosowanie kropli do oczu powoduje szybkie złagodzenie objawów suchości oka. Poprzez zastosowanie kropli XEDRENIO można złagodzić objawy suchości oka i zapobiec dalszym komplikacjom spowodowanym przez ten stan.

Przyczyny suchości oczu:

- zaburzenia w funkcjonowaniu filmu łzowego spowodowane niewystarczającą ilością łez lub ich nadmiernym parowaniem, które może doprowadzić do uszkodzenia powierzchni oka i dyskomfortu,
- środowisko (ogrzewanie, klimatyzacja, ostre światła, dym i wiatr),
- długotrwała praca przy komputerze,
- stosowanie kropli do oczu o działaniu obkurczającym,
- proces starzenia (około 75% populacji powyżej 65 roku życia doświadcza objawów suchości oczu),
- noszenie soczewek kontaktowych,
- zabiegi chirurgiczne lub urazy oka,
- pleć (zmiany hormonalne w okresie ciąży, karmienia piersią, menstruacji lub menopauzy),
- działanie innych leków (produktów stosowanych w leczeniu depresji, nadciśnienia, antykoncepcji),
- inne stany chorobowe (reumatoidalne zapalenie stawów, cukrzyca, astma, choroby tarczycy, jaskra).

Produkt XEDRENIO, krople do oczu może być stosowany przez osoby noszące soczewki kontaktowe.

Hialuronian sodu obecny jest naturalnie w cieple skłizymy oka. Po zastosowaniu kropli do oczu XEDRENIO zawarty w nich hialuronian sodu wraz z każdym mrugnięciem powieki tworzy barierę ochronną na powierzchni oka, usuwając uczucie suchości, piasku w oku oraz podrażnienia.

Zastosowana technologia aplikacji pozwala na bezpieczne stosowanie produktu, a także zapobiega zakażeniu roztworu po jego otwarciu.

Krople do oczu XEDRENIO mogą być również stosowane po zabiegach chirurgicznych oraz w celu zapobiegania uczucia suchości w oku powstałego na skutek stosowania leków przeciwzapalnych do oka (po konsultacji z lekarzem).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Nie należy stosować kropli XEDRENIO:

- w przypadku nadwrażliwości (alergii) na hialuronian sodu lub na każdy inny składnik kropli. W przypadku pojawienia się reakcji alergicznej, należy zaprzestać stosowania wyrobu i natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Inne ostrzeżenia:

- Jeśli pacjent stwierdzi naruszenie lub zniszczenie aplikatora, nie należy stosować produktu.
- Dla zapewnienia bezpiecznej aplikacji i odpowiedniego poziomu higieny, każde opakowanie kropli powinno być używane wyłącznie przez jednego użytkownika.
- Nie są znane żadne interakcje pomiędzy kroplami XEDRENIO i płynami do soczewek kontaktowych, innymi kroplami do oczu lub maściami stosowanymi do oczu. Jeśli pacjent stosuje inny produkt do oka, należy odczekać przynajmniej 15 minut pomiędzy aplikacjami.

Bezpieczeństwo produktu

Technologia z zastosowaniem aplikatora zawierającego filtr, który pozwala na bezpieczne stosowanie kropli, gdyż zapobiega on zakażeniu roztworu po jego otwarciu.

Produkt nie zawiera konserwantów, co obniża ryzyko wystąpienia podrażnienia i uszkodzenia powierzchni oka.


Produkt jest dobrze tolerowany. Jeśli jednak pacjent zaobserwuje jakiegokolwiek działania niepożądane, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Instrukcja stosowania: Krople mogą być stosowane wielokrotnie w ciągu dnia, w zależności od potrzeby. W przypadku prawidłowego stosowania, jedna butelka kropli wystarcza na 30 dni stosowania. W przypadku konieczności dłuższego stosowania, należy skonsultować się z lekarzem.

Należy podać 1-2 krople do worka spojówkowego, a następnie mrugnąć powieką kilka razy w celu rozprowadzenia kropli po całej powierzchni oka.

Produkt nie zawiera konserwantów, aplikacja kropli jest bezpieczna dla oczu.

Krople do oczu mogą być aplikowane na dwa sposoby, przedstawione poniżej:

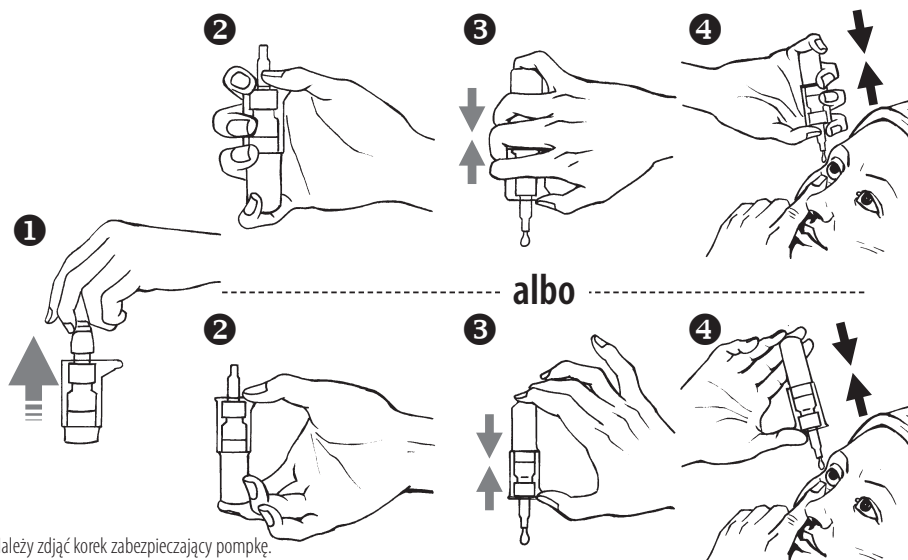

1. Należy zdjąć korek zabezpieczający pompkę.
2. Chwycić pompkę ręką, jak pokazano na rysunku 2.
3. Odwrócić butelkę i nacisnąć pompkę, aż do chwili, kiedy pojawi się pierwsza kropla roztworu.
4. Trzymać butelkę odwróconą, należy podać do oka odpowiednią ilość kropli poprzez naciskanie pompki.

Uwaga: natychmiast po zastosowaniu kropli, widzenie może ulec pogorszeniu. Dlatego zaleca się, aby podczas krótkiego okresu czasu powstrzymać się od prowadzenia pojazdów lub obsługiwanie maszyn i poczekać, aż powróci ostrość widzenia.

INNE WYROBY MEDYCZNE Z SERII XEDRENIO

| Wyrób medyczny | Przeznaczenie | Skład | Stosowanie | Przyczyny zaburzeń | Stosowanie z soczewkami kontaktowymi | Działanie |
|-----------------------|--|--|--|---|--------------------------------------|--|
| XEDRENIO | Stany łagodnego wysuszenia oczu | Hialuronian sodu 0,21% | Podać 1-2 krople do oka kilka razy w ciągu dnia lub w zależności od potrzeby | alergia, uczucie ciała obcego w oku, czynniki zewnętrzne (suche powietrze, dym), noszenie soczewek kontaktowych | Tak | Natychmiastowe odświeżenie i długotrwałe uczucie nawilżenia |
| XEDRENIO Forte | Stany silnego wysuszenia oczu | Hialuronian sodu 0,4% | Podać 1-2 krople do oka kilka razy w ciągu dnia lub w zależności od potrzeby | proces starzenia, farmakoterapia, silnie działające czynniki zewnętrzne (wiatr, słońce, suche powietrze) | Nie | Natychmiastowa ulga, długotrwałe uczucie komfortu i nawilżenia, produkt może powodować chwilowe zaburzenia ostrości widzenia |
| XEDRENIO Dex | Stany wysuszenia oczu i regeneracji powierzchni oczu | Hialuronian sodu 0,15% + Dekspantenol 2% | Podać 1-2 krople do oka kilka razy w ciągu dnia lub w zależności od potrzeby | podrażnienia mechaniczne oczu: noszenie soczewek kontaktowych, zabiegi chirurgiczne lub diagnostyczne, stosowanie leków | Tak | Natychmiastowe odświeżenie i długotrwałe uczucie nawilżenia |

Wielkość opakowania: 10 ml

Data ważności znajduje się na opakowaniu.

Okres ważności po pierwszym otwarciu wynosi 180 dni. Nie należy stosować produktu po upływie daty ważności.

Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej 30°C, w oryginalnym opakowaniu. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.



Dystrybutor:
UNIPHARM HOLDINGS Sp. z o.o.,
Ul. Puławska 428
02-884 Warszawa



JADRAN GALENSKI LABORATORIJ D.D.,
Svilno 20, 51000 Rijeka,
Chorwacja

Wyjaśnienie znaków graficznych:



Wytwórca



Należy przeczytać instrukcję stosowania



Produkt sterylny, aseptyczny proces wytwarzania



Znak CE



Przechowywać w temperaturze do 30°C



Data ważności



Numer serii:



Uwaga, należy sprawdzić instrukcję stosowania (w celu zapoznania się z istotnymi informacjami dotyczącymi ostrzeżeń i środków ostrożności).

Data aktualizacji 02/2018.